


Professional for you

ETHANOL AUS BIO-
LOGISCHER GÄRUNG

Flächendesinfektion



Professional for you Flächendesinfektion Wipes 60 Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung

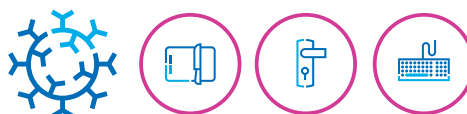

- Ausgezeichnet für Zuhause und unterwegs
- Wirksam gegen Coronaviren
- Gute Material- und Hautverträglichkeit

Produktbeschreibung

Professional for you Flächendesinfektion Wipes 60 sind Tücher zur Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung. Sie verfügen über eine sehr gute Hautverträglichkeit, welche dermatologisch getestet ist. Außerdem sind sie parfümfrei und gut geeignet für alle abwaschbaren alkoholbeständigen Oberflächen im Haushalt und unterwegs.

Anwendungsgebiete

Gemäß Bioidentifikationsverordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von Flächen aller Art. Geeignet zur Verwendung im Küchenbereich.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (gebrauchsfertig, geprüft bei 17 °C - 26 °C, hohe und niedrige Belastung):

bakterizid (EN 13727, EN 16615), levurozid (EN 13624, EN 16615, Candidapilze):	2 min
tuberkulozid (EN 14348) (M. terrae):	1 min
begrenzt viruzid (EN 14476, behüllte Viren wie HIV, HBV, HCV, Coronaviren):	1 min

Anwendung

Ein Tuch aus der Verpackung entnehmen und Oberflächen und Gegenstände bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit feucht halten. Einwirkzeiten beachten. Nicht auf alkoholempfindlichen Oberflächen (z.B. Acrylglas) anwenden. Nach der Entnahme die Packung wieder sorgfältig verschließen. Sichtbare Verschmutzungen sind vor der Desinfektion zu entfernen. Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang

mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Tücher nur einmal verwenden. Nicht in der Toilette entsorgen. Nicht zur Anwendung auf der Haut geeignet. Die Tränklösung enthält Bio-Alkohol. VAH-gelistet unter DESCOSCEPT SENSITIVE WIPES. Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 42 Tage.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polymethylmethacrylat (PMMA, Acrylglas).

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Produkt	Gebinde	Tuchgröße	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
Professional for you Flächendesinfektion Wipes 60	Packung	20 x 22 cm	60 Tücher	9	00-323DS-To60PY	19798360

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

BAuA Reg. Nr. N-115689

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  0123



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:

<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.